



# GUERISON

## NANO THERAPY



### **User Manual**

**ULTRA GUERISON**  
**- UST 630**

# 차 례

## 인 사 말

<b>01 장비 사항</b>	<b>04</b>
SPEC	04
<b>02 구성 품</b>	<b>04</b>
<b>03 기기 각부 명칭 및 설치 법</b>	<b>05</b>
울트라 게리종 외관 이미지 및 연결 방법	05
거치대 설치 법	06
<b>04 나노 건 관리 법</b>	<b>07</b>
나노 건 설치 및 분리 법	07
나노 건 캡(헤드) 장착과 분리 법	08
나노 건과 캡(헤드) 세척 법	08
<b>05 컨트롤 부 설명</b>	<b>09</b>
<b>06 기기 작동 및 관리 법</b>	<b>10</b>
기기 작동 법	10
나노 건 앰플 투여 법	12
게리종테라피 관리 법	13
기기 유지관리	15
<b>07 사용시 주의사항</b>	<b>16</b>
<b>08 점검 및 운반/보관</b>	<b>16</b>
제품 점검 및 관리	16
제품의 운반 및 보관	16
<b>09 제품 보증서</b>	<b>17</b>



# Guerison Green Global

\* 제품장치와 사용설명서는 사용하시는 분의 편의를 위하여 사전예고 없이 기능 및 성능이 변경될 수 있습니다.

저희 (주)게리종 그린글로벌의 게리종나노테라피 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
본 제품은 생산에서 출하까지 수준 높은 품질관리 시스템으로 진행되고 있으며, 특히 철저한 품질검사 과정을 거친 신뢰성이 뛰어난 제품입니다.

본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보신 후 (주)게리종 그린글로벌의 게리종 나노테라피의 특성을 충분히 활용해 주시기 바랍니다.

(주)게리종 그린글로벌은 고객 여러분의 아름답고 건강한 삶을 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

전원코드 및 기타 A/S 사항 발생 시에는 임의 분해를 하지 마시고,  
(주)게리종 그린글로벌의 본사나 A/S 센터로 연락해 주시길 바랍니다.  
[www.guerisongg.com](http://www.guerisongg.com) 02)565-6969

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 알고 게리종나노테라피 제품을 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

## 안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기위한 내용입니다. 내용을 잘 알고 사용법에 따라 사용하세요.



**주의 ! 지시에 따르지 않을 경우 심각한 상해를 입거나 물질적 손상을 유발할 수 있습니다.**

- 매뉴얼에 나와 있는 사용법을 숙지하여 사용하십시오.
- 본 기기를 인체에 내장 또는 접촉할 수 있는 의료용 기기(예: 페이스메이커)와 함께 사용하지 마십시오.
- 기기 위나 주변에 음료를 놓아두지 마십시오. 음료가 쏟아져 기기 동작에 악영향을 주거나 감전 또는 쇼트에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 기기 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 물이 들어갔을 경우, 전원코드를 분리하고 통풍이 잘 되는 곳에 장시간 건조 시킨 뒤 사용하십시오. 만약 작동이 되지 않을 경우 당사의 A/S 센터에 문의하십시오.
- 기기의 고장을 발견하거나 정전이 되었을 경우 즉각 전원 스위치를 끄고 사용을 중지하십시오.

#### **설치 및 보관 주의사항**

- 제품 운반 시 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. (제품 고장의 원인이 됩니다.)
- 본 제품이 직사광선에 직접 노출되지 않도록 해 주십시오. (변색 될 수도 있습니다.)
- 알코올 또는 신나와 같은 가연성제품을 가까이 두지 마십시오. 또는 제품을 전열기구 및 난로와 가까이 설치하지 마십시오. (제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.)
- 제품을 경사진 곳에 설치하거나 흔들리기 쉽거나 심하게 진동이 되는 장소에 설치하지 마십시오.
- 고온 다습한 곳에 보관 또는 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

#### **사용 관련 주의사항**

- 사용설명서 이외에 기록되지 않은 사항이 있을 경우 반드시 제품구입처나 본사에 내용을 확인하신 후 사용하십시오.
- 사용방법 및 작동 방법을 반드시 숙지한 후에 사용하십시오.
- 삐죽하거나 날카로운 물건을 제품에 접촉시키거나 긁지 마십시오.
- 기기 작동 시 무리한 힘을 가하지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 본 기기를 사용 시 주변 사람과 장난을 치거나 말하지 마십시오.
- 기기 세척은 보푸라기가 없는 부드러운 천에 중성세제를 약간 묻혀 닦아주십시오. (벤젠, 알콜, 톨루엔 등 유사 용제는 사용하지 마십시오.)
- 제품 수리는 구입처 또는 제조사에 문의 및 접수하여 처리하십시오.
- 임의 분해, 개조 시 A/S 받으실 수 없습니다.

## 제 1 장. 장비 사항

### 1.1 SPEC

제 품 명	피부 및 모발 관리기	최대스프레이압력	200kPa
모 델 명	UST 630	규 격	500*350*950 (mm)
전격전압	AC 220V,60Hz	저 출 력 레 이 저	50mW
소비전력	150W	중 량	38 Kg

## 제 2 장. 구성 품

명 칭	수 량	단 위	비 고
장비 본체	1	대	
나노 건	1	EA	페이스, 바디 공용
레이저 ASS'Y	1	EA	레이저+이온 전선+호스
이온 접지 붕	1	EA	
이온 전선	1	EA	
나노 건 헤드	1	SET	4EA
거치 대	1	EA	
온열 기	1	EA	별도 구매 상품
전원 케이블	1	EA	1.8m
사용자 매뉴얼	1	부	

\* 옵션 사항에 따라 포함여부 및 수량이 변동될 수 있습니다.

## 제 3장. 기기 각부 명칭 및 설치 법

### 3.1 신형아프로디테 외관 이미지 및 연결 방법



## 기기 설치 법



- ① 레이저 연결 포트
- ② 나노건 연결 전기천공 포트
- ③ 접지봉
- ④ 온열기 연결 포트 ( 별도구매 )
- ⑤ Nano 스프레이 커넥터
- ⑥ 전원 어답터


## 3.2 거치대 설치 법



- ① 제품 윗면의 거치대 조립부에 있는 볼트 4 개(빨강원) 를 풀어줍니다.
- ② 거치대(초록선) 를 위치에 맞게 장착한 후, 볼트를 조여 고정시켜 줍니다.

## 제 4 장. 나노 건 관리 법

### 4.1 나노 건 설치 및 분리 법

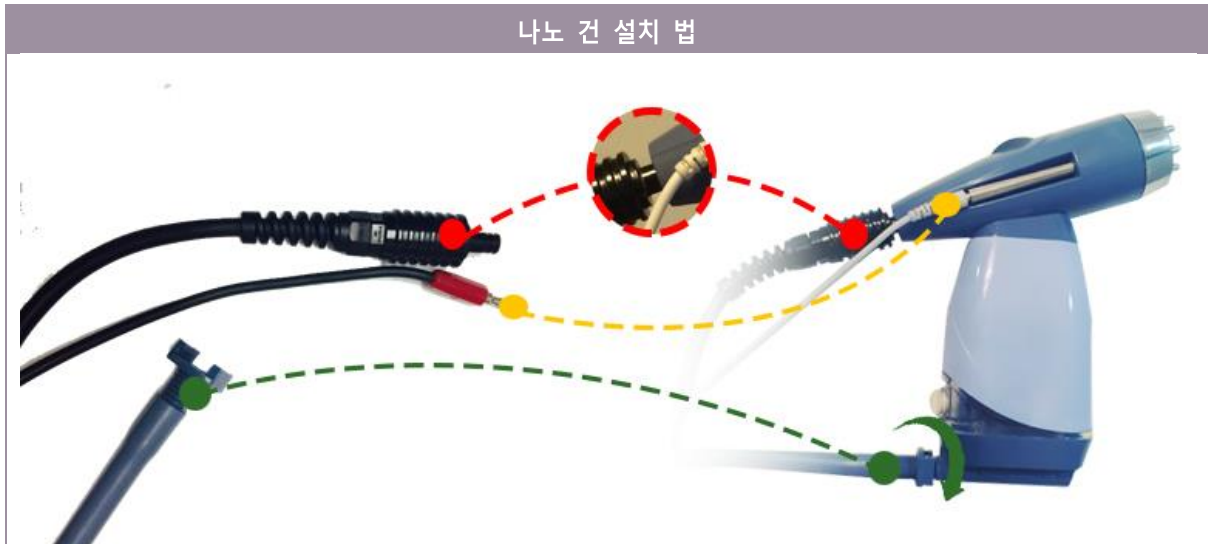

- - 레이저 선 : 레이저와 나노 건을 연결합니다. (\* 위의 사진과 같이, 레이저를 끝까지 넣지 않도록 합니다.)
- - 전기천공 선 : 전기천공 선을 나노건에 연결합니다.
- - 컴프레서 호스 : 호스와 나노 건을 연결합니다.  
(호스 끝의 커넥터를 세로 형태로 나노 건에 끼워 연결 후, 가로로 돌려 홈을 고정시켜 빠지지 않게 합니다.)



## 4.2 나노 건 캡(헤드) 장착과 분리 법

나노 건 헤드의 장착과 분리 법



- ① 캡의 원형 홈을 나노 건에 맞추어 그림과 같이 꼽습니다. (\*캡을 나노 건에 짝 끼지 않아도 됩니다.)
- ② 나노 건에서 캡을 분리할 때에는, 손가락으로 캡의 중앙 구멍을 걸어 뽑아냅니다.

## 4.3 나노 건과 캡(헤드) 세척 법

- 세척 시 순수한 물만 사용하여 세척하십시오. (중성세제 또는 기타 세정 액 사용 금지)
- 세척 시 도구를 사용할 경우 나노 건 내부 부품 파손이 우려되므로, 사용을 피해 주십시오.

나노 건 세척 법





뜨거운 물로 여러 차례 헹궈준 뒤에,  
깨끗한 정제수 물 한 컵 분량으로  
헹궈 건조시킵니다.

**\*물이 너무 뜨겁지 않게 주의해 주세요**





**\*나노건 캡 세척 법**

주방세제+물을 1 : 5 비율로 섞어서  
소독 전용솔로 청소한 후  
자외선살균기에 건조시킵니다.

## 제 5 장. 컨트롤 부 설명



- ◆ Mode : 테라피 모드를 설정합니다. (나노테라피-N, 온열테라피-H)
- ◆ TIME/ ↑ ↓ : 시간을 설정합니다.
- ◆ Auto-Mode : 실행 값이 미리 설정된 오토모드로 사용할 수 있습니다.
- ◆ Real-Temp : 온열 도자의 실제온도 표시.(온열테라피)
- ◆ Set-Temp : 온열 도자의 온도를 조절합니다. (온열테라피)
- ◆ Level(mA) / ↑ ↓ : mA를 조절합니다. (나노테라피)
- ◆ Level(Hz) / ↑ ↓ : Hz를 조절합니다. (나노테라피)
- ◆ Start/Stop : 기기를 동작/멈춤 합니다.

## 제 6 장. 기기 작동 및 관리 법

### 6.1 기기 작동 법

전원코드를 연결하고, 전원 콘센트의 스위치를 눌러 램프가 켜졌는지 확인한다.



## 기기 조작 법 - 케어

### 1. 온열 케어



- Mode - H 온열모드
- Start/Stop - 기기를 동작/멈춤 합니다.
- TIME - 시간을 설정합니다
- Auto-mode - 'A0' 모드로 설정합니다.
- Set-Temp - 온열기 온도를 조절합니다. (최고 50도까지 설정가능)

**\*\*낮은온도부터 천천히 올려가며 케어 하십시오.  
온도가 매우 뜨거우니, 주의하여 사용하십시오.**

### 2. 나노 케어

이 조작버튼은 온열 액세서리(바디용) 추가 구매 시  
이용하실 수 있는 모드입니다.



관리시간은 최소 20분을 기준으로 합니다.

- Level(mA) - 갈바닉을 조절할 수 있습니다.
- Level(Hz) - 헤르쯔(Hz)를 조절할 수 있습니다.

- Mode - N 나노테라피 / H 온열모드
- Start/Stop - 기기를 동작/멈춤 합니다.
- TIME - 시간을 설정합니다
- Auto-mode - 레이저를 설정 합니다. TIME이 미리 설정된 자동모드 (20분)입니다 (Level(mA), Level(Hz), Auto mode 변경가능)

**E4 (기본모드) - 굵은 주름 & 리프팅**  
 E1 Mode - 여드름 / 트러블  
 E2 Mode - 민감성 피부  
 E3 Mode - 복합성 피부  
 E5 Mode - 미세주름 효과  
 E6 Mode - 두피 / 바디 관리  
 E7 Mode - 레이저 OFF

Hz	2	3	4	5 ~ 8
mA	1	2	3	4 ~ 8

얇은 피부, 미세주름, 민감성(트러블)    표준레벨    두꺼운 피부 & 지방성피부

표준 레벨로 5분 이상 관리 후  
피부상태에 따라 레벨 상향조절 가능  
목주름 & 두피 관리 시 레벨 조절  
→ 최고 10 까지 가능

## 6.2 나노 건 앰플 투여 법

**\*\* 거리중 나노테라피 기기는 거리중 더블 이팩트 앰플 기준으로 맞춤 제작된 기기로, 기타 제품을 투여 시 효과가 미비하며 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다. (AS 및 기타 서비스 제공 불가 사유)**

**더블 이팩트 앰플 개봉 법**

**1**



**2**



**3**



❶ 앰플 투명 캡에 표시된 화살표 방향을 확인합니다.

❷ 투명 캡을 손 끝을 이용하여 화살표 방향으로 열어줍니다. (완전히 제거하지 마십시오!)

❸ 그림과 같이 투명 캡에 연결된 알루미늄 커버의 한 쪽 끝만 분리되도록 따준 후, 투명 캡을 잡고 돌려 알루미늄 커버를 완전히 제거합니다.

\*\* 양 쪽 알루미늄의 끝이 모두 투명 캡에서 분리된 경우, 절대 손으로 시도하지 마시고 투명 캡이나 도구를 이용하여 제거하십시오, 손이 베일 수 있습니다.

**나노 건 앰플 투여 법**




나노 건의 상단 뚜껑을 열고 앰플을 부어 넣어주면, 하단에 눈금을 통해 앰플 투여량을 확인할 수 있습니다. 이때, 앰플 잔량을 확인하며 투여하도록 합니다.

\*\* 나노 건 앰플 정량 : 8ml (~10ml)

\*\* 앰플 1 병당 분사 시간 : 20~30 분 (분사 조절에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. - 잔량이 남을 수 있음)

### 앰플 도포 법



앰플 캡을 제거하고, 스포이드 형 캡을 끼워, 사용합니다.  
앰플이 나올 수 있도록 기울여 주고 그림과 같이 스포이드 캡의  
입구 부분을 눌러 주어야 앰플이 배출됩니다.

### 6.3 게리종테라피 관리 법

#### 게리종테라피 전기천공 사용 방법




[이온 접지봉]  
기기와 연결된 이온접지봉(-)을 그림과 같이 피시술자의 손에  
접지.




[나노 건]  
기기와 연결된 나노 건의 헤드부분(+)을  
피 시술자의 피부에 접촉하여 시술.

## 게리종테라피 방법


### 1. 페이스 관리

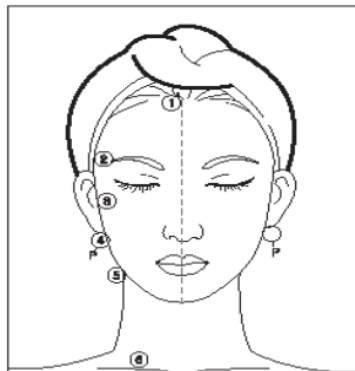

얼굴을 반으로 나눈다.  
1~6의 각 포인트에서 10초간 머무른다.

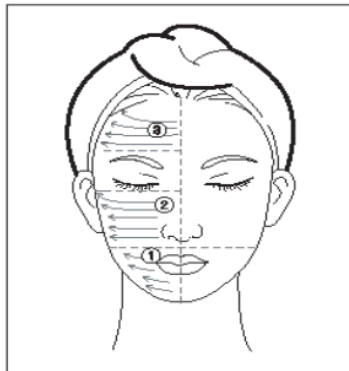

턱, 코 옆, 이마를 3등분하여 피부 속으로 슬루션이 골고루 흡수되도록 천천히 이동한다.

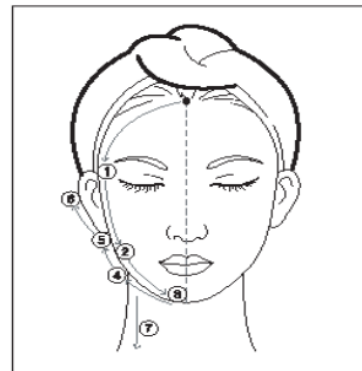

얼굴라인을 타고 천천히 턱선까지 왔다가 턱 밑에서 귀뒤쪽으로 쓸어 올린후 터미누스로 마무리

### 2. 목 관리



턱살을 귀까지 잡아 당긴다.  
턱라인을 따라 올려준다.





목 라인을 끌고 가서 목 옆에서 멈춘다.  
목의 깊은 주름을 중심으로 10초 정도 멈춰준다



왼손을 검은 점을 따라 쇄골 밑까지 목 살을 잡아 당긴 상태에서 위에서 아래로 내려준다.  
처음에 할 때는 쇄골 전까지, 두 번째 할 때는 쇄골 지나 깊게 내린다.

### 3. 두피 관리

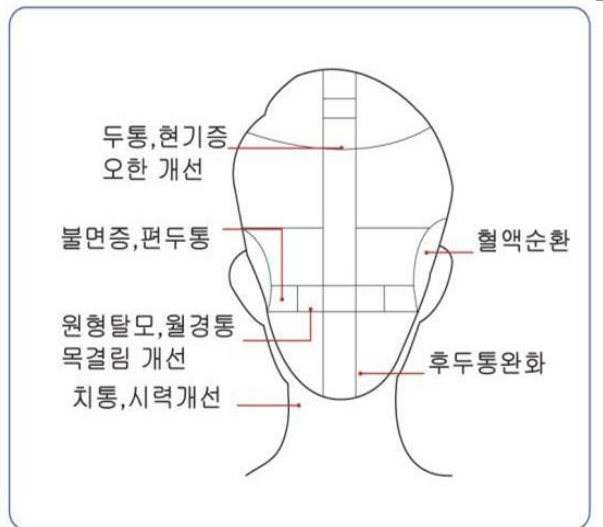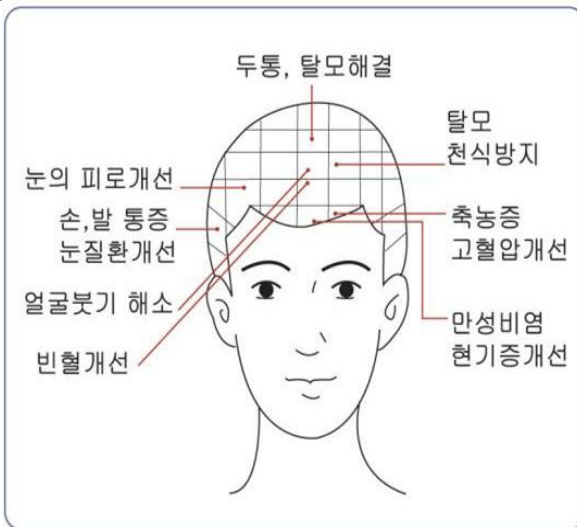



우리 몸에는 림프가 뭉쳐있는 부분이 있습니다.  
 이 곳은 노폐물이 빠져나가는 곳으로, 림프 흐름에 따라 관리하는 것이 중요합니다.

### 6.4 기기 유지관리

#### ✓ 유지 및 보수 항목

1. 나노건  
 사용한 나노건에 잔여 앰플이 굳기에 주 1회 나노건을 꼭 청소해 주세요.  
 (뜨거운 물로 여러 번 행군 후 정제수로 1회 행군)
2. 캡  
 고객 한 명에 캡 한 개를 사용 / 두피와 얼굴은 캡을 구분하여 관리 합니다.  
 사용 후 모아서 한번에 세제로 청소한 후 자외선 소독기에 건조시킨 후 사용해 주세요.
3. 저출력 레이저 포트  
 레이저가 약해지거나 흐려지면 저출력 레이저 포트를 뽑아서, 알코올을 뿌린 후 면봉으로 안쪽을 닦아주세요.
4. Nano Spray 호스  
 Nano Spray 호스가 많이 꼬이면 호스가 잘 빠질 수 있으므로 꼬이지 않게 조립하세요.



#### ✓ 주의사항

- ★ 나노건 에 충격을 주지 마세요. (떨어뜨림 주의)
- ★ 나노건 세척 후 조립 시 무리한 힘을 가하지 마세요.
- ★ 나노건 세척 후 조립 시 레이저의 초점이 중앙으로 되었는지 확인하세요.

※ 기계에 대한 문의 사항이 있으시면  
 본사로 연락바랍니다. ☺ ※  
 Tel. 02-565-6969

## 제 7 장. 사용시 주의사항

- 1) 본체의 주변 공간을 확보 후 사용해야 하며, 밀폐된 장소는 피한다.
- 2) 본체의 작동 시작 시, 항상 컨트롤부의 이온상태를 확인하고 사용하여야 하며, 확인되지 않은 상태에서 액세서리가 피부에 직접적으로 닿지 않도록 주의한다.
- 3) 작동 중 갑작스러운 전원 꺼짐은 기능상 문제의 원인이 될 수 있으므로 전원코드 선의 길이 및 공간을 충분히 확보하여 사용한다.
- 4) 사용 중 오일(마사지크림) 및 이물질이 액세서리 내부에 흡입되지 않도록 유의한다.
- 5) 이온 작동 시 세기를 약하게 시작하여 조금씩 세게 하는 방법으로 안전하게 사용하도록 한다.
- 6) 본체를 절대 뒤집거나 기울여 작동하지 않도록 유의한다.
- 7) 장기간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼거나 후면의 전원 콘센트의 적색 램프스위치를 꺼준다.

## 제 8 장. 점검 및 운반/보관

### 8.1 제품 점검 및 관리

- 1) 전원 입력이 되지 않을 시, 먼저 전원 콘센트 스위치 및 퓨즈를 확인한다.
- 2) 감압 성능이 저하되었다면, 호스 및 액세서리부에 이물질이 끼어 있는지 또는 필터를 확인한다.
- 3) 청소 시 변질 및 파손의 우려가 있으므로 액체류 및 약품류로 명판부를 닦지 않는다.
- 4) 장비의 분해 및 개조는 문제의 원인이 되며, 분해 및 개조한 제품은 판매사의 책임이 없다.
- 5) 제품 본체의 라벨 손상시 A/S 비용은 유상으로 처리된다.

### 8.2 제품의 운반 및 보관

- 1) 장비를 절대 뒤집거나 기울인 상태로 운반 또는 보관하지 말아야 한다.
- 2) 장기간 보관 시 먼저, 이물질이 끼지 않도록 포장을 하여 보관하며, 습기가 많은 곳은 피한다.
- 3) 장비에 외부적 충격이 가해지지 않도록 운반 및 보관 시 주의한다.
- 4) 상온에서 보관 및 사용한다.

## 제 9 장. 제품 보증서



### 서비스에 대하여.

개정 2015.11.03

- A/S 를 받으실 경우 반드시 제품 보증서를 지참하셔야 합니다.
- 제품 보증서는 제품구매 시 발행되며 재발급 되지 않습니다.
- 저희 (주)게리종 그린글로벌에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 뒷면의 라벨 손상 및 임의 제거 시 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.
- 제품 모델명, 고장상태, 연락처 등을 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공해 드립니다.
- (주)게리종 그린글로벌 고객센터 02)565-6969



### 무료 서비스 & 유료 서비스

- 구입 후 제품 보증기간 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
- ※ 제품 보증기간 : 본체(1 년), 악세사리(6 개월)
- 부품 보유기간 : 제품 단종 후 5 년

### 제 품 보 증 서

제 품 명	
A / S 기 간	본체 구입 일로부터 1 년간
구 입 일	년 월 일
(주)게리종 그린글로벌	주 소 : 서울시 강남구 역삼동 738-32 대삼빌딩 3F (전관)
	대표 전화 : 02)565-6969

본 보증서는 작성 내용에 따라 무상수리 할 것을 약속하는 증서입니다.  
 구입일로부터 보증기간 중 고장이 발생할 경우에는 본 보증서를 제시하시고  
 당사에 수리를 의뢰하여 주십시오



## 소비자 보장 기준

소비자 피해 유형		보상내용		
		품질보증기간 이내	품질보증기간 이후	
정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 후 10 일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	/	
	구입 후 1 개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
	수리 가능	동일 하자로 2 회까지 고장 발생시	무상 수리	유상 수리
		동일 하자로 4 회까지 고장 발생시	제품 교환	
		서로 다른 하자로 5 회까지 고장 발생시		
	수리 불가능	유상 수리 후 3 개월 이내 동일 하자로 고장발생시	/	무상수리 (1 회에 한함)
		수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품 교환	/
부품 보유기간 내 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시				
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상 제품 교환	/	
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
운송 과정에서 고장 발생시		유상 수리 또는 유상 교환 (운송업체에서 보상 협의)		



**고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어주세요**

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장 난 경우
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품 기능 사용 설명 및 제품을 분해하지 않고 간단한 처리가 이루어진 경우</li> <li>- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거한 경우</li> <li>- 판매점에서 제품을 부실하게 설치하여 재 설치한 경우</li> <li>- 제품 내부에 외부 이물질이 유입되어 발생한 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장이 발생한 경우</li> <li>- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우</li> <li>- (주)계리중 그린글로벌에서 인가 한 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우</li> <li>- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장 및 손상이 발생한 경우</li> <li>- 맞지 않는 전기 용량을 사용하여 고장이 발생한 경우 예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우</li> <li>- (주)계리중 그린글로벌에서 미지정된 소모품이나 옵션품을 사용하여 고장이 발생한 경우</li> <li>- 사용설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우</li> </ul>

※ 제품의 기능 향상이나 사양 변경에 의해 제품의 부품/회로 일부가 변경 될 수도 있습니다.



# Guerison Green Global

서울시 강남구 역삼동 738-32 대삼빌딩 3F

Tel. 02)565-6969 Fax.02)566-3637

E-mail. [guerison\\_kr@naver.com](mailto:guerison_kr@naver.com)

Web. [www.guerisongg.com](http://www.guerisongg.com)