



# GUERISON

## NANO THERAPY



### **User Manual**

**PORTABLE GUERISON  
- DEEPLYTION 885S**

# 차 례

## 인 사 말

<b>01 장비 사항</b>	<b>04</b>
SPEC	04
<b>02 구성 품</b>	<b>04</b>
<b>03 기기 각부 명칭 및 설치 법</b>	<b>05</b>
포터블 게리종 외관 이미지 및 연결 방법	05
거치대 설치 법	06
<b>04 나노 건 관리 법</b>	<b>06</b>
나노 건 설치 및 분리 법	06
나노 건 캡(헤드) 장착과 분리 법	07
나노 건과 캡(헤드) 세척 법	08
<b>05 컨트롤 부 설명</b>	<b>09</b>
<b>06 기기 작동 및 관리 법</b>	<b>10</b>
기기 작동 법	10
나노 건 앰플 투여 법	11
게리종테라피 관리 법	12
기기 유지관리	14
<b>07 사용시 주의사항</b>	<b>15</b>
<b>08 점검 및 운반/보관</b>	<b>15</b>
제품 점검 및 관리	15
제품의 운반 및 보관	15
<b>09 제품 보증서</b>	<b>16</b>



# Guerison Green Global

\* 제품장치와 사용설명서는 사용하시는 분의 편의를 위하여 사전예고 없이 기능 및 성능이 변경될 수 있습니다.

저희 (주)게리종 그린글로벌의 게리종나노테라피 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
본 제품은 생산에서 출하까지 수준 높은 품질관리 시스템으로 진행되고 있으며, 특히 철저한 품질검사 과정을 거친 신뢰성이 뛰어난 제품입니다.

본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보신 후 (주)게리종 그린글로벌의 게리종 나노테라피의 특성을 충분히 활용해 주시기 바랍니다.

(주)게리종 그린글로벌은 고객 여러분의 아름답고 건강한 삶을 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

전원코드 및 기타 A/S 사항 발생 시에는 임의 분해를 하지 마시고,  
(주)게리종 그린글로벌의 본사나 A/S 센터로 연락해 주시길 바랍니다.  
[www.guerisongg.com](http://www.guerisongg.com) 02)565-6969

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 알고 게리종나노테라피 제품을 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

## 안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기위한 내용입니다. 내용을 잘 알고 사용법에 따라 사용하세요.



**주의 ! 지시에 따르지 않을 경우 심각한 상해를 입거나 물질적 손상을 유발할 수 있습니다.**

- 매뉴얼에 나와 있는 사용법을 숙지하여 사용하십시오.
- 본 기기를 인체에 내장 또는 접촉할 수 있는 의료용 기기(예: 페이스메이커)와 함께 사용하지 마십시오.
- 기기 위나 주변에 음료를 놓아두지 마십시오. 음료가 쏟아져 기기 동작에 악영향을 주거나 감전 또는 쇼트에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 기기 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 물이 들어갔을 경우, 전원코드를 분리하고 통풍이 잘 되는 곳에 장시간 건조 시킨 뒤 사용하십시오. 만약 작동이 되지 않을 경우 당사의 A/S 센터에 문의하십시오.
- 기기의 고장을 발견하거나 정전이 되었을 경우 즉각 전원 스위치를 끄고 사용을 중지하십시오.

#### **설치 및 보관 주의사항**

- 제품 운반 시 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. (제품 고장의 원인이 됩니다.)
- 본 제품이 직사광선에 직접 노출되지 않도록 해 주십시오. (변색 될 수도 있습니다.)
- 알코올 또는 신나와 같은 가연성제품을 가까이 두지 마십시오. 또는 제품을 전열기구 및 난로와 가까이 설치하지 마십시오. (제품 변형 및 화재의 원인이 됩니다.)
- 제품을 경사진 곳에 설치하거나 흔들리기 쉽거나 심하게 진동이 되는 장소에 설치하지 마십시오.
- 고온 다습한 곳에 보관 또는 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

#### **사용 관련 주의사항**

- 사용설명서 이외에 기록되지 않은 사항이 있을 경우 반드시 제품구입처나 본사에 내용을 확인하신 후 사용하십시오.
- 사용방법 및 작동 방법을 반드시 숙지한 후에 사용하십시오.
- 삐죽하거나 날카로운 물건을 제품에 접촉시키거나 긁지 마십시오.
- 기기 작동 시 무리한 힘을 가하지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 본 기기를 사용 시 주변 사람과 장난을 치거나 말하지 마십시오.
- 기기 세척은 보푸라기가 없는 부드러운 천에 중성세제를 약간 묻혀 닦아주십시오. (벤젠, 알콜, 톨루엔 등 유사 용제는 사용하지 마십시오.)
- 제품 수리는 구입처 또는 제조사에 문의 및 접수하여 처리하십시오.
- 임의 분해, 개조 시 A/S 받으실 수 없습니다.

## 제 1 장. 장비 사항

### 1.1 SPEC

제 품 명	피부 및 모발 관리기	최대스프레이압력	35cmHg
모 델 명	DEEPLYTION 885S	규 격	500*350*237 (mm)
전격전압	AC 220V,60Hz	저 출 력 레 이 저	30mW
소비전력	200W	중 량	11 Kg





## 제 2 장. 구성 품

명 칭	수 량	단 위	비 고
장비 본체	1	대	
나노 건	1	EA	페이스, 바디 공용
레이저 ASS'Y	1	EA	레이저+이온 전선+호스
이온 접지 봉	1	EA	
이온 전선	1	EA	
나노 건 헤드	1	SET	4EA
거치 대	1	EA	
전원 케이블	1	EA	1.8m
사용자 매뉴얼	1	부	

\* 옵션 사항에 따라 포함여부 및 수량이 변동될 수 있습니다.


## 제 3장. 기기 각부 명칭 및 설치 법

### 3.1 포터블 게리종 외관 이미지 및 연결 방법

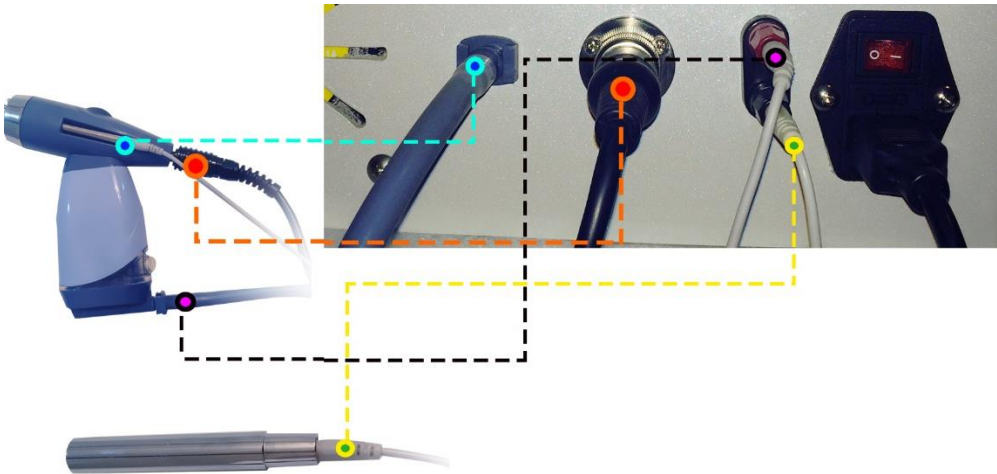정면 이미지	측면 이미지
	
기기 연결 구성	
	
기기 설치 법	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Nano 스프레이 커넥터 (커넥터를 가로로 돌려 고정)</li> <li>② 레이저 연결 포트</li> <li>③ 나노건 연결 전기천공 포트</li> <li>④ 접지봉</li> <li>⑤ 전원 어답터</li> </ol>

### 3.2 거치대 설치 법

필요 도구 : +형 드라이버

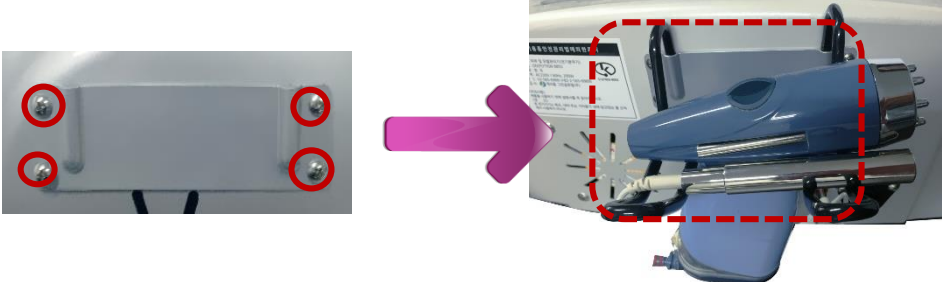


- ① 제품 후면의 거치대 조립부에 있는 볼트 4 개를 드라이버를 이용하여 조금씩 풀어서, 거치대가 들어갈 수 있을 정도의 공간을 확보합니다.
- ② 거치대를 위치에 맞게 장착한 후, 볼트를 조여 고정시켜 줍니다.

## 제 4 장. 나노 건 관리 법

### 4.1 나노 건 설치 및 분리 법

나노 건 설치 법

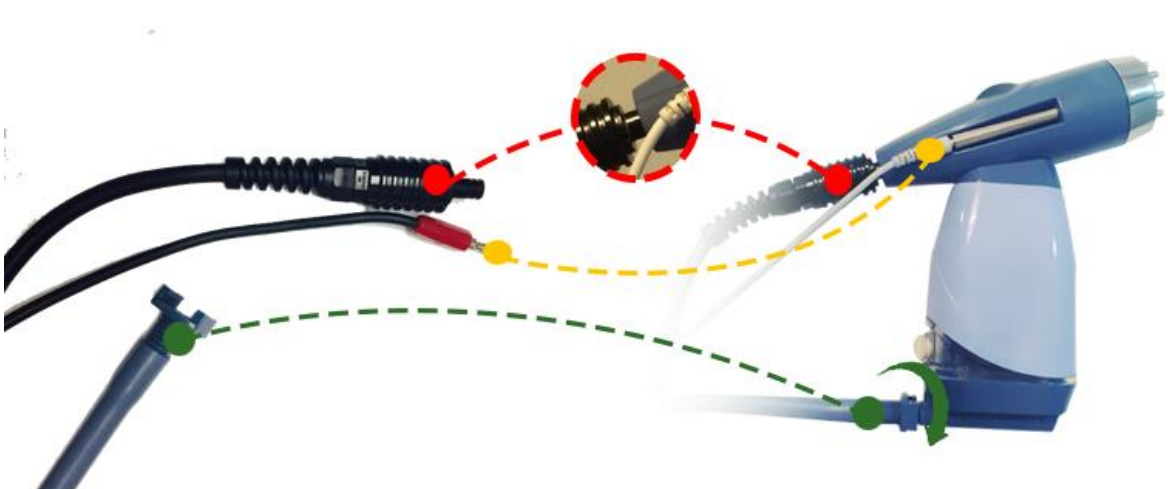

- - 레이저 선 : 레이저와 나노 건을 연결합니다. (\* 위의 사진과 같이, 레이저를 끝까지 놓지 않도록 합니다.)
- - 전기천공 선 : 전기천공 선을 나노건에 연결합니다.
- - 컴프레셔 호스 : 호스와 나노 건을 연결합니다.  
(호스 끝의 커넥터를 세로 형태로 나노 건에 끼워 연결 후, 가로로 돌려 홈을 고정시켜 빠지지 않게 합니다.)

## 나노 건 분리 법



## 4.2 나노 건 캡(헤드) 장착과 분리 법



### 4.3 나노 건과 캡(헤드) 세척 법

- 세척 시 순수한 물만 사용하여 세척하십시오. (중성세제 또는 기타 세정 액 사용 금지)
- 세척 시 도구를 사용할 경우 나노 건 내부 부품 파손이 우려되므로, 사용을 피해 주십시오.

나노 건 세척 법





뜨거운 물로 여러 차례 헹궈준 뒤에,  
깨끗한 정제수 물 한 컵 분량으로  
헹궈 건조시킵니다.

**\*물이 너무 뜨겁지 않게 주의해 주세요**






**\*나노건 캡 세척 법**

주방세제+물을 1 : 5 비율로 섞어서  
소독 전용솔로 청소한 후  
자외선살균기에 건조시킵니다.

## 제 5 장. 컨트롤 부 설명

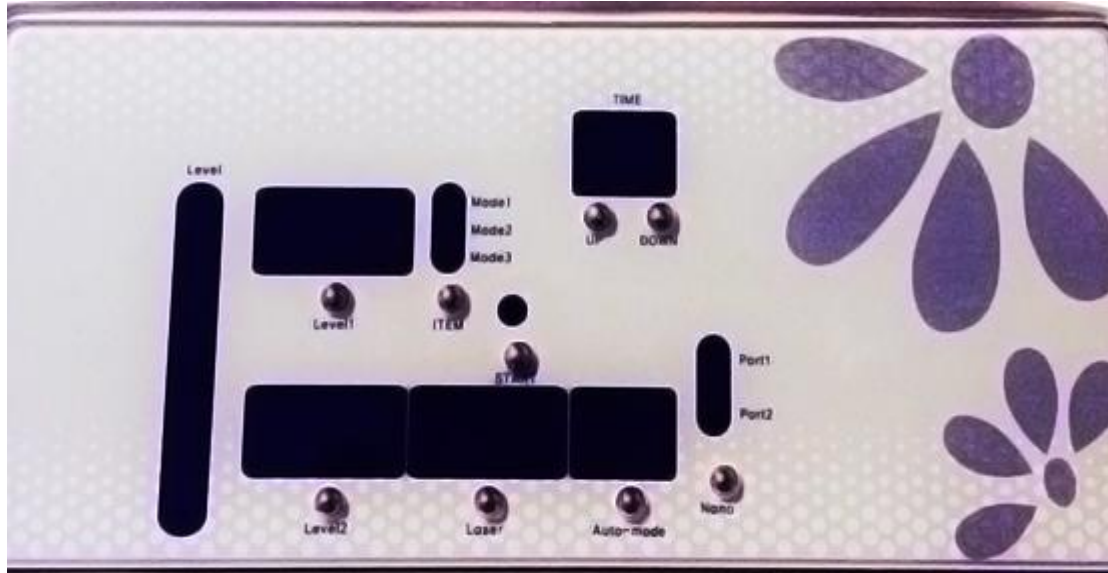

- ◆ TIME/ ↑ ↓ : 시간을 설정합니다.
- ◆ Level 1 / ↑ ↓ : 전류케어 파동(Hz)을 조절합니다.
- ◆ Level 2 / ↑ ↓ : 전류케어 mA레벨을 조절합니다.
- ◆ Laser / L1,PL1,none : 레이저모드를 설정합니다.
- ◆ START : 기기를 동작/멈춤 합니다.
- ◆ Auto-mode / A1~A5 : 설정값이 미리 설정된 모드로 간편하게 사용할 수 있습니다.
- ◆ ※ 그 외 기타 기능 버튼은 사용하지 않으셔도 됩니다.

## 제 6 장. 기기 작동 및 관리 법

### 6.1 기기 작동 법

전원코드를 연결하고, 전원 콘센트의 스위치를 눌러 램프가 켜졌는지 확인한다.

전원 코드 연결



전원 콘센트 램프



기기 조작 법



표준 레벨로 5분 이상 관리 후 피부상태에 따라 레벨 상향조절 가능  
목주름 & 두피 관리 시 레벨 조절 → 최고 10 까지 가능

- **Auto-mode**  
뒤) 빨간색 전원버튼을 껍니다.  
앞)Auto-mode 버튼으로 **A1 모드** 선택 후 **START( ON/OFF)** 선택.
- **Laser** - 남자 → L, 여자 → PL  
**\*\*얼굴에 지방이식 한 분은 레이저를 꼭 꺼주세요 !**
- **TIME** - 시간을 설정합니다
- **Level 1** - 헤르쯔(파동)를 조절할 수 있습니다.
- **Level 2** - 갈바닉(전류)을 조절할 수 있습니다.

• 오토모드로 설정한 A1모드가 가장 강력하므로, 그 외 기타 다른 모드나 기능 버튼을 누르지 않으셔도 됩니다.

Hz	2	3	4	5 ~ 10
mA	1	2	3	4 ~ 10

얇은 피부 미세주름 **표준레벨** 두꺼운 피부 & 지방성피부 민감성(트러블)

## 6.2 나노 건 앰플 투여 법

**\*\* 게리종 나노테라피 기기는 게리종 더블 이팩트 앰플 기준으로 맞춤 제작된 기기이므로, 기타 제품을 투여 시 효과가 미비하며 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다. (AS 및 기타 서비스 제공 불가 사유)**



- ❶ 앰플 투명 캡에 표시된 화살표 방향을 확인합니다.
- ❷ 투명 캡을 손 끝을 이용하여 화살표 방향으로 열어줍니다. (완전히 제거하지 마십시오!)
- ❸ 그림과 같이 투명 캡에 연결된 알루미늄 커버의 한 쪽 끝만 분리되도록 따준 후, 투명 캡을 잡고 돌려 알루미늄 커버를 완전히 제거합니다.

**\*\* 양 쪽 알루미늄의 끝이 모두 투명 캡에서 분리된 경우, 절대 손으로 시도하지 마시고 투명 캡이나 도구를 이용하여 제거하십시오, 손이 베일 수 있습니다.**



나노 건의 상단 뚜껑을 열고 앰플을 부어 넣어주면, 하단에 눈금을 통해 앰플 투여량을 확인할 수 있습니다. 이때, 앰플 잔량을 확인하며 투여하도록 합니다.

\*\* 나노 건 앰플 정량 : 8ml (~10ml)

\*\* 앰플 1 병당 분사 시간 : 20~30 분 (분사 조절에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. - 잔량이 남을 수 있음)

### 앰플 도포 법



앰플 캡을 제거하고, 스포이드 형 캡을 끼워, 사용합니다.  
앰플이 나올 수 있도록 기울여 주고 그림과 같이 스포이드 캡의  
입구 부분을 눌러 주어야 앰플이 배출됩니다.

### 6.3 게리종테라피 관리 법

#### 게리종테라피 전기천공 사용 방법




[이온 접지봉]  
기기와 연결된 이온접지봉(-)을 그림과 같이 피시술자의 손에  
접지.




[나노 건]  
기기와 연결된 나노 건의 헤드부분(+)을  
피 시술자의 피부에 접촉하여 시술.

## 게리종테라피 방법


### 1. 페이스 관리

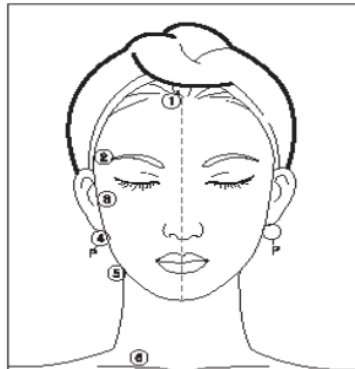

얼굴을 반으로 나눈다.  
1~6의 각 포인트에서 10초간 머무른다.

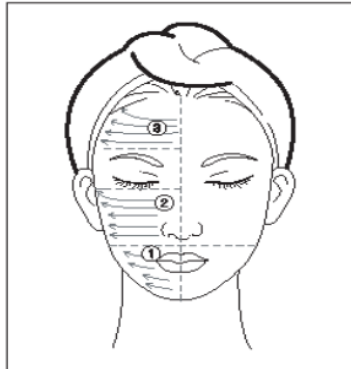

턱, 코 옆, 이마를 3등분하여 피부 속으로 슬루션이 골고루 흡수되도록 천천히 이동한다.

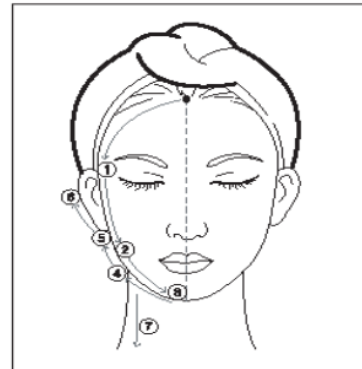

얼굴라인을 타고 천천히 턱선까지 왔다가 턱 밑에서 귀뒤쪽으로 쓸어 올린후 터미누스로 마무리

### 2. 목 관리



턱살을 귀까지 잡아 당긴다.  
턱라인을 따라 올려준다.



목 라인을 끌고 가서 목 옆에서 멈춘다.  
목의 깊은 주름을 중심으로 10초 정도 멈춘다



왼손을 검은 점을 따라 쇄골 밑까지 목 살을 잡아 당긴 상태에서 위에서 아래로 내려준다.  
처음에 할 때는 쇄골 전까지, 두 번째 할 때는 쇄골 지나 깊게 내린다.

### 3. 두피 관리

**두통, 탈모해결**

- 눈의 피로개선
- 손, 발 통증
- 눈질환개선
- 얼굴붓기 해소
- 빈혈개선
- 탈모 천식방지
- 축농증
- 고혈압개선
- 만성비염
- 현기증개선

- 두통, 현기증 오한 개선
- 불면증, 편두통
- 원형탈모, 월경통
- 목걸림 개선
- 치통, 시력개선
- 혈액순환
- 후두통완화



우리 몸에는 림프가 뭉쳐있는 부분이 있습니다.

이 곳은 노폐물이 빠져나가는 곳으로, 림프 흐름에 따라 관리하는 것이 중요합니다.

## 6.4 기기 유지관리

### ✓ 유지 및 보수 항목

#### 1. 나노건

사용한 나노건에 잔여 앰플이 굳기에 **주 1회** 나노건을 꼭 청소해 주세요.  
(뜨거운 물로 여러 번 행군 후 정제수로 1회 행군)

#### 2. 캡

고객 한 명에 **캡 한 개를 사용 / 두피와 얼굴은 캡을 구분하여 관리** 합니다.  
사용 후 모아서 한번에 세제로 청소한 후 자외선 소독기에 건조시킨 후 사용해 주세요.

#### 3. 저출력 레이저 포트

레이저가 약해지거나 흐려지면 저출력 레이저 포트를 뽑아서, 알코올을 뿌린 후 면봉으로 안쪽을 닦아주세요.

#### 4. Nano Spray 호스

Nano Spray 호스가 많이 꼬이면 호스가 잘 빠질 수 있으므로 꼬이지 않게 조립하세요.

### ✓ 주의사항

- ★ 나노건 에 충격을 주지 마세요. (떨어뜨림 주의)
- ★ 나노건 세척 후 조립 시 무리한 힘을 가하지 마세요.
- ★ 나노건 세척 후 조립 시 레이저의 초점이 중앙으로 되었는지 확인하세요.



나노 스프레이 호스

※ 기계에 대한 문의 사항이 있으시면  
본사로 연락바랍니다. ☺ ※  
Tel. 02-565-6969

## 제 7 장. 사용시 주의사항

- 1) 본체의 주변 공간을 확보 후 사용해야 하며, 밀폐된 장소는 피한다.
- 2) 본체의 작동 시작 시, 항상 컨트롤부의 이온상태를 확인하고 사용하여야 하며, 확인되지 않은 상태에서 액세서리가 피부에 직접적으로 닿지 않도록 주의한다.
- 3) 작동 중 갑작스러운 전원 꺼짐은 기능상 문제의 원인이 될 수 있으므로 전원코드 선의 길이 및 공간을 충분히 확보하여 사용한다.
- 4) 사용 중 오일(마사지크림) 및 이물질이 액세서리 내부에 흡입되지 않도록 유의한다.
- 5) 이온 작동 시 세기를 약하게 시작하여 조금씩 세게 하는 방법으로 안전하게 사용하도록 한다.
- 6) 본체를 절대 뒤집거나 기울여 작동하지 않도록 유의한다.
- 7) 장기간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼거나 후면의 전원 콘센트의 적색 램프스위치를 꺼준다.

## 제 8 장. 점검 및 운반/보관

### 8.1 제품 점검 및 관리

- 1) 전원 입력이 되지 않을 시, 먼저 전원 콘센트 스위치 및 퓨즈를 확인한다.
- 2) 감압 성능이 저하되었다면, 호스 및 액세서리부에 이물질이 끼어 있는지 또는 필터를 확인한다.
- 3) 청소 시 변질 및 파손의 우려가 있으므로 액체류 및 약품류로 명판부를 닦지 않는다.
- 4) 장비의 분해 및 개조는 문제의 원인이 되며, 분해 및 개조한 제품은 판매사의 책임이 없다.
- 5) 제품 본체의 라벨 손상시 A/S 비용은 유상으로 처리된다.

### 8.2 제품의 운반 및 보관

- 1) 장비를 절대 뒤집거나 기울인 상태로 운반 또는 보관하지 말아야 한다.
- 2) 장기간 보관 시 먼저, 이물질이 끼지 않도록 포장을 하여 보관하며, 습기가 많은 곳은 피한다.
- 3) 장비에 외부적 충격이 가해지지 않도록 운반 및 보관 시 주의한다.
- 4) 상온에서 보관 및 사용한다.

## 제 9 장. 제품 보증서



### 서비스에 대하여.

개정 2015.11.03

- A/S 를 받으실 경우 반드시 제품 보증서를 지참하셔야 합니다.
- 제품 보증서는 제품구매 시 발행되며 재발급 되지 않습니다.
- 저희 (주)게리종 그린글로벌에서는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 뒷면의 라벨 손상 및 임의 제거 시 보증기간 이내라도 유상처리 됩니다.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.
- 제품 모델명, 고장상태, 연락처 등을 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공해 드립니다.
- (주)게리종 그린글로벌 고객센터 02)565-6969



### 무료 서비스 & 유료 서비스

- 구입 후 제품 보증기간 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.


※ 제품 보증기간 : 본체(1 년), 악세사리(6 개월)

부품 보유기간 : 제품 단종 후 5 년

### 제 품 보 증 서

제 품 명	
A / S 기 간	본체 구입 일로부터 1 년간
구 입 일	년 월 일
(주)게리종 그린글로벌	주 소 : 서울시 강남구 역삼동 738-32 대삼빌딩 3F (전관)
	대표 전화 : 02)565-6969

본 보증서는 작성 내용에 따라 무상수리 할 것을 약속하는 증서입니다.  
구입일로부터 보증기간 중 고장이 발생할 경우에는 본 보증서를 제시하시고  
당사에 수리를 의뢰하여 주십시오

 소비자 보장 기준

소비자 피해 유형		보상내용		
		품질보증기간 이내	품질보증기간 이후	
정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 후 10 일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환		
	구입 후 1 개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리		
	수리 가능	동일 하자로 2 회까지 고장 발생시	무상 수리	유상 수리
		동일 하자로 4 회까지 고장 발생시	제품 교환	
		서로 다른 하자로 5 회까지 고장 발생시		
	수리 불가능	유상 수리 후 3 개월 이내 동일 하자로 고장발생시		무상수리 (1 회에 한함)
		수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품 교환	
부품 보유기간 내 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시				
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상 제품 교환		
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
운송 과정에서 고장 발생시		유상 수리 또는 유상 교환 (운송업체에서 보상 협의)		



## 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어주세요

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장 난 경우
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제품 기능 사용 설명 및 제품을 분해하지 않고 간단한 처리가 이루어진 경우</li> <li>- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거한 경우</li> <li>- 판매점에서 제품을 부실하게 설치하여 재 설치한 경우</li> <li>- 제품 내부에 외부 이물질이 유입되어 발생한 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장이 발생한 경우</li> <li>- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우</li> <li>- (주)계리중 그린글로벌에서 인가 한 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우</li> <li>- 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장 및 손상이 발생한 경우</li> <li>- 맞지 않는 전기 용량을 사용하여 고장이 발생한 경우 예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우</li> <li>- (주)계리중 그린글로벌에서 미지정한 소모품이나 옵션품을 사용하여 고장이 발생한 경우</li> <li>- 사용설명서 내 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우</li> </ul>

※ 제품의 기능 향상이나 사양 변경에 의해 제품의 부품/회로 일부가 변경 될 수도 있습니다.



# Guerison Green Global

서울시 강남구 역삼동 738-32 대삼빌딩 3F

Tel. 02)565-6969 Fax.02)566-3637

E-mail. [guerison\\_kr@naver.com](mailto:guerison_kr@naver.com)

Web. [www.guerisongg.com](http://www.guerisongg.com)